

NANO M.ON

Prémiová CE nanovláknenná zdravotnická maska



s dvojí filtrační účinností materiálu, který zachytí
99,9 % virů, bakterií, prachových částic a smogu

Jednorázová. Při opakovaném použití hrozí nebezpečí kontaminace.

Návod k použití:

Jak se nasazuje maska s gumičkami

1. Umyjte a utřete si ruce a vyjměte masku z krabice.
2. Uchopte vyztuženým ohybatelným okrajem směrem nahoru.
3. Držte masku za poutka a zahákněte za uši.
4. Vyztužený okraj vytvarujte podle tvaru svého nosu a přetáhněte spodní okraj masky přes ústa a bradu.
5. Na masku nesahejte během nošení.



Jak se sundává maska s gumičkami

1. Umyjte a utřete si ruce.
2. Nedotýkejte se přední strany masky, která je kontaminovaná. Dotýkejte se pouze gumiček.
3. Uchopte obě gumičky a opatrně zvedněte a sejměte masku.
4. Vyhodte masku do odpadu.
5. Umyjte si ruce.

